

Přečtěte si pečlivě celý příbalový leták. Obsahuje důležité informace pro spotřebitele. Jedná se o zdravotnický prostředek, který je dostupný bez lékařského předpisu.

Nicméně abyste dosáhli lepší účinnosti, měli byste jej užívat v souladu s popsanou indikací.

- Ponechte si tento příbalový leták, možná jej budete muset přečíst znovu.
- Pro další informace nebo rady kontaktujte svého lékaře a/nebo lékárníka.
- Pokud příznaky přetrvávají po určité době, poraďte se s lékařem.

Prečítajte si starostlivo celý príbalový leták: obsahuje dôležité informácie pre spotrebiteľa. Ide o zdravotnícku pomôcku, ktorá je dostupná bez lekárskeho predpisu. Avšak aby ste dosiahli lepšiu účinnosť, mali by ste ju používať v súlade s popísanou indikáciou.

- Ponechajte si tento príbalový leták, možno si ho budete musieť prečítať znova.
- Pre ďalšie informácie alebo rady sa obráťte na svojho lekára a/alebo lekárníka.
- Ak príznaky pretrvávajú po určitej dobe, poraďte sa s lekárom.

Proktis-M[®]

čípky

ZLOŽENÍ

Sodná sůl kyseliny hyaluronové 5 mg, pupečník ázijský, měsíček lékařský, aloe pravá, čajovník austrálský, polysyntetické glyceridy, BHT.

ZPŮSOB BALENÍ

PROKTIS-M je dodáván ve formě čípků pro rektální použití. Balení obsahuje 10 čípků po 2 g.

POPIS A DŮVODY PRO POUŽITÍ

Čípky PROKTIS-M působí díky přítomnosti kyseliny hyaluronové, mukopolysacharidu, který je hojně distribuován v mnoha tělesných tkáních. Kyselina hyaluronová slouží jako strukturální podpora a přináší tak tkáním napětí, výživu a pružnost. Četné klinické studie prokázaly schopnost kyseliny hyaluronové urychlit a zlepšit proces reepitelizace a obnovy tkání.

INDIKACE

Pomocná léčba při procesech hojení stavů anorektálního kanálu po proktologické operaci; vnitřní a vnější hemoroidy; proktitida; kryptitida; anální ragády; fisury; perianální píštěle.

DŮVODY PRO NEPOUŽÍVÁNÍ

Nepoužívejte v případě individuální přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

Těhotenství a kojení

Za těchto okolností je vhodné kontaktovat vašeho lékaře.

Vliv na schopnost řídit a obsluhovat zařízení nebo stroje

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

INTERAKCE S JINÝMI PRODUKTY

Interakce s jinými produkty nejsou známy, proto je před použitím čípků PROKTIS-M současně s jinými zdravotnickými prostředky nebo léky pro rektální použití vhodné kontaktovat lékaře.

Proktis-M[®]

čapíky

ZLOŽENIE

Sodná soľ kyseliny hyaluronovej 5 mg, pupočník ázijský, nechťík lekárskeý, aloa pravá, čajovník austrálskeý, polysyntetické glyceridy, BHT.

SPŮSOB BALENIA

PROKTIS-M sa dodáva vo forme čapíkov na rektálne použitie. Balenie obsahuje 10 čapíkov po 2 g.

POPIS A DŮVODY NA POUŽITIE

Čapíky PROKTIS-M pôsobia vďaka prítomnosti kyseliny hyaluronovej, mukopolysacharidu, ktorý je hojne distribuovaný v mnohých telesných tkanivách. Kyselina hyaluronová slúži ako štruktúralna podpora a prináša tak tkanivám napätie, výživu a pružnosť. Početné klinické štúdie preukázali schopnosť kyseliny hyaluronovej urychliť a zlepšiť proces reepitelizácie a obnovy tkanív.

INDIKÁCIE

Pomocná liečba pri procesoch hojenia stavov anorektálneho kanála po proktologickej operácii; vnútorné a vonkajšie hemoroidy; proktitída; kryptitída; análne ragády; fisúry; perianálne fistuly.

DŮVODY NA NEPOUŽÍVANIE

Nepoužíajte v prípade individuálnej precitlivlosti na niektorú zložku prípravku.

Tehotenstvo a dojčenie

Za týchto okolností je vhodné obrátiť sa na vášho lekára.

Vplyv na schopnosť riadiť a obsluhovať zariadenia alebo stroje


Žiadne špeciálne opatrenia nie sú potrebné.

INTERAKCIE S INÝMI PRODUKTMÍ

Interakcie s inými produktmi nie sú známe, preto je pred použitím čapíkov PROKTIS-M súčasne s inými zdravotnickými pomôckami alebo liekmi na rektálne použitie vhodné kontaktovať lekára.


NÁVOD K POUŽITÍ

Vyjmete čípek tahem za dvě předem nastřižená křídélka blistru. Zavedte čípek do konečníku. Umyjte si ruce před a po použití zdravotnického prostředku.

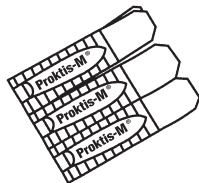

NÁVOD NA POUŽITIE

Vyberte čapík ťahom za dve vopred nastrihnuté krídelká blistra. Zavedte čapík do konečníka. Umyte si ruky pred a po použití zdravotnickej pomôcky.

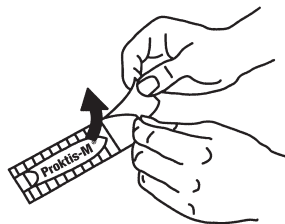

DOBA APLIKACE A DÉLKA APLIKACE

Použijte jeden čípek denně, nejlépe večer před spaním nebo podle lékařského předpisu. Délka používání závisí na vývoji příznaků; v případě potřeby se čípky PROKTIS-M mohou používat po dlouhou dobu.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zvláště prodloužené používání všech místně aplikovaných produktů může vést k projevům precitlivlosti. V těchto případech léčbu přerušete a poradte se se svým lékařem za účelem zahájení vhodné léčby. Pokud se vyskytnou jiné nežádoucí účinky, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se kontaktu s očima. Nepolykejte.

DOBA POUŽITELNOSTI, SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Doba použitelnosti se vztahuje na neotevřený a správně skladovaný přípravek. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, nebo pokud je obal otevřen nebo poškozen. Skladujte zdravotnický prostředek chráněný před světlem a teplem, nejlépe při teplotě mezi 4°C a 25°C. Zdravotnické prostředky se nesmí likvidovat vyhozením do kanalizace nebo domovního odpadu; zeptejte se svého lékárníka na způsob likvidace zdravotnických prostředků, které již nepoužíváte. Pomůže to chránit životní prostředí.

ČAS APLIKÁCIE A DĹŽKA APLIKÁCIE

Použite jeden čapík denne, najlepšie večer pred spaním alebo podľa lekárskeho predpisu. Dĺžka používania závisí od vývoja príznakov; v prípade potreby sa čapíky PROKTIS-M môžu používať dlhodobo.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Používanie všetkých produktov na lokálne použitie, najmä v prípade dlhodobej aplikácie, môže spôsobiť precitlivenosť. Ak k tomu dôjde, prerušte liečbu a obráťte sa na lekára s cieľom začatia vhodnej liečby. Ak sa vyskytnú iné nežiaduce účinky, informujte svojho lekára alebo lekárníka.

VAROVANIE

Uchovávejte mimo dosahu dětí. Vyhnite sa kontaktu s očami. Nepreháťajte.

OBDOBIE POUŽITELNOSTI, SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA

Lehota použitelnosti sa vztahuje na neotvorený a správně skladovaný prípravok. Nepoužívejte prípravok po uplynutí lehoty použitelnosti, alebo ak je obal otvorený alebo poškozený. Skladujte zdravotnícku pomôcku chránenú pred svetlom a teplotou, najlepšie pri teplote 4°C až 25°C. Zdravotnícku pomôcku sa nesmú likvidovať vyhodnením do kanalizácie alebo domového odpadu; opýtajte sa svojho lekárníka na spôsob likvidácie zdravotníckych pomôcok, ktoré už nepoužívate. Pomôže to chrániť životné prostredie.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK **CE 0373**

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA **CE 0373**

 Výrobce/Výrobca: FARMA-DERMA s.r.l.
Via dell'Artigiano 6-8 - 40010 Sala Bolognese (BO) - ITÁLIE/TALIANSKO (ITALY)

Distributor/Distribútor: AXONIA, a.s.
Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Klánovice - ČESKÁ REPUBLIKA